

מדריך למשתמש

פורטל XR



פורטל ה-XR נמצא בתוך משקפי ה-Meta Quest 3S שלכם. הוא מעניק לכם גישה לעולמה הווירטואלי של XRHealth, הכולל סביבות טיפוליות, פעילויות אינטראקטיביות ומתן כלים לרווחה רגשית וגופנית, כולם נוצרו כדי לעזור לכם להרגיש טוב יותר ולתפקד בצורה מיטבית.

לפני שמתחילים:

יש לוודא שהמשקפיים נמצאים בטעינה מלאה והשלטים עובדים כמו שצריך.

1. הדלק את המשקפיים



לחצן הפעלה


2. עקבו אחר ההוראות



למדו איך להשתמש בשלטי הבקרה והתאמת המשקפיים לנוחות מרבית עבורכם. * המדריך הזה יופיע רק בפעם הראשונה שתשתמשו במשקפיים.


3. היכנסו לפורטל ה-XR

3.1 במסך ההפעלה, השתמשו בשלט כדי לבחור את אפליקציית "XR Portal".

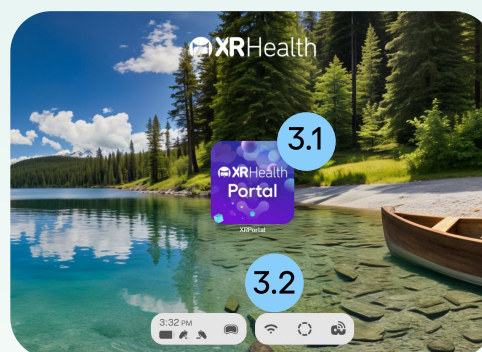

3.2 **התחברו ל Wi-Fi**
נדרש עבור מפגשים מרחוק, עדכונים וסנכרון עם MyXRHealth. **לחצו כאן** כדי לראות מדריך לצורך התחברות ל Wi-Fi.

4. הפעלת הסביבה

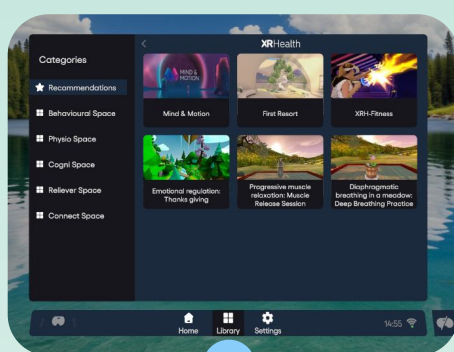

4.1

4.1 **היכנסו ללשונית הספרייה:**
הספרייה מסודרת לפי קטגוריות, בהן מוצגות כל האפשרויות. השתמשו בשלט כדי לגלול למטה ולראות עוד סביבות.

4.2 בחרו סביבה על מנת לראות פרטים נוספים.

4.3 תשנו את ההגדרות לפי הצורך.

4.4 לחצו Start להתחלה.



4.2

4.3


4.4

5. חזרה לספרייה



5.1

5.1 ברוב האפליקציות, לחצו על כפתור ה-Menu בשלט השמאלי. הלחיצה תשהה את האפליקציה ותפתח תפריט שממנו תוכלו לצאת מהסביבה.

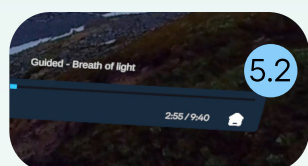

5.2

5.2 אם אתם צופים בסרטון תלת מימד, הקישו על אייקון הבית בסרגל הווידאו.



5.3

5.3 יתכן שחלק מהאפליקציות ייראו אחרת, בחלקן יהיה כפתור יציאה משלהן, ובחלקן תצטרכו ללחוץ על כפתור ה-Meta בשלט הימני ולבחור "יציאה".